



PINCE FINGERFIX


RÉF.: 0227 02 00

Pince FINGERFIX

RÉF.: 0227 02 00



Longueur : 16,3 cm - Poids : 197 g

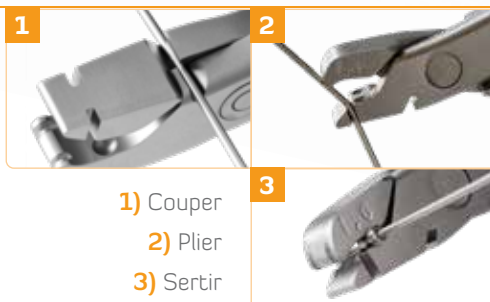

La pince FINGERFIX peut plier et couper des broches allant de 1 mm de diamètre à 1,6 mm. La pince FINGERFIX a été développée afin de pouvoir plier une broche sans la solliciter mécaniquement dans son passage trans-osseux.

PLIAGE

Mise en place :

La broche est insérée latéralement dans l'une des fentes de la branche inférieure.


Pliage :



Pliage d'une broche
de Kirschner
Ø 1,5 mm

Lors du pliage, la broche est repoussée par le nez de la branche supérieure et guidée par une petite gorge.

La fente latérale droite de la branche inférieure de la pince peut accueillir une broche de 1,6 mm ou de 1,2 mm de diamètre. Celle de gauche, plus petite, accueillera une broche de 1 mm ou 1,2 mm de diamètre.

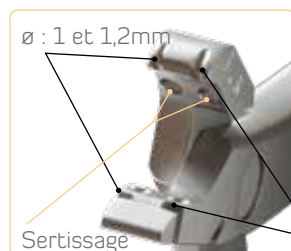

Ø : 1 et 1,2mm

Sertissage

Ø : 1,2 et 1,6mm

Nota :

- » Il suffira que la broche dépasse de 20 mm de la surface de la peau pour pouvoir être pliée sans effort par la pince FINGERFIX.
- » Pour apprécier pleinement que le fait de tordre la broche avec la pince FINGERFIX n'affecte pas celle-ci, tenir la broche entre l'index et le pouce et ce juste au contact de la pince.

COUPE



La broche est introduite complètement dans l'orifice de coupe (type coupe-cigare).

Coupe FINGERFIX



Coupe standard



La coupe FINGERFIX se fait par cisaillement (type coupe-cigare) et non par écrasement.

De ce fait la qualité de la coupe en bout de broche est nette et sans bavure contrairement à une coupe standard.

Photos de coupe réalisées sur une broche de Kirschner de 1,6 mm de diamètre.

- » Garantie : 5 ans,
- » 1 an pour les mors
- » Acier inoxydable
- » Modèle déposé ©